

マグフィット® IP用アクセサリ 「マウンティングリング」専用取り外し器具

「マウンティングリムーバ」

医療機器届出番号: 23B1X10004000005



マグフィット®の磁石構造体とともに、義歯に合着されたマウンティングリングを義歯から取り外すことを目的としたアクセサリです。

仕様

品番

MRR-01

材質: ステンレス鋼

マウンティングリムーバ(以下リムーバと記載)は、写真1のように、持ち手部和リング接触部を有しています。また、先端のリング接触部は、十字の凸の形状を有しています(写真2)。



リング接触部

持ち手部

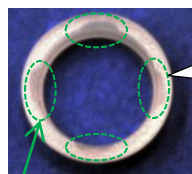


写真1)リムーバ写真



写真2)リング接触部拡大

使用手順

マウンティングリング(以下リングと記載)には、キーパ側の面(合着後に義歯より見える面)に、切込凹み部を備えています(写真3: 左, 中央)。



切込凹み部4箇所

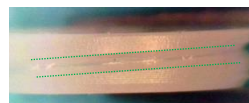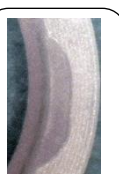

左)全体写真 中央)切込凹み部拡大 右)リング側面
写真3 リング写真

1) 磁性構造体の合着後に、リムーバのリング接触部を、義歯に合着されたリングの切込凹み部に差し込みます(写真4)。

2) 差し込んだ状態で、反時計回しに回してください。リング側面に付与され螺旋上のガイド(写真3: 右)に沿って、義歯からリングのみが外れます。

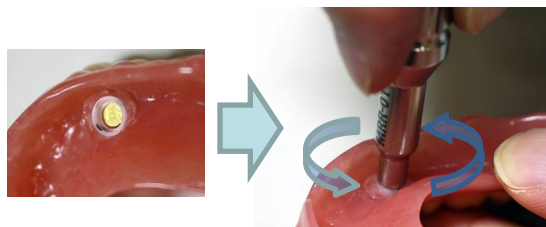


写真4 リング取り外し様子

注意事項

- ① 磁石構造体の吸着面にキズがつかないように注意してください。
- ② 複数の磁石構造体を合着する際は、全ての磁石構造体を合着完了後に、まとめてマウンティングリングを外してください。

愛知製鋼株式会社

〒476-8666 愛知県東海市荒尾町ワノ割1番地
フリーコール 0120-34-0632